

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה - המועצה לענף הלול

המעבדות לבריאות העוף

הנחיות לדיגום דם

1. המדגם :

- לכל לול יש לדגום לפחות 25 עופות שונים מאזורים שונים בלול.
 - יש למלא את כל המבחנות בגביע (25 מבחנות בערכה).
 - במשקי רבייה : יש לדגום 25 עופות מכל לול ולא פחות מ-100 עופות למשק. המדגם חייב לכלול 10% עופות זכרים.
 - יש לסמן את מבחנות הדם הנלקחות מהזכרים.
2. יש למלא את כל הפרטים ע"ג המדבקה המוצמדת לגביע עם המבחנות.

3. דיגום הדם :

- וריד הכנף (Brachial Vein) הוא המקום הנוח ביותר לדיגום דם מפטמים, רבייה כבדה, מטילות והודים.
- הנח את העוף על משטח, הרם את כנפיו והשכב אותו על צידו. ניתן גם להרים את כנפי העוף כאשר הוא עומד על הרפד.
 - תלוש את הנוצות בחלק הפנימי בבסיס הכנף (אפשר להשתמש במים לצורך הרכקת הנוצות וחשיפת הוריד). הוריד יתגלה בשקע שבין שרירי הכנף.
 - דקור בעדינות את וריד הכנף בעזרת הדוקרן הייעודי הנמצא בגביע המבחנות ואסוף את הדם הנוזל ישירות לתוך מבחנה. לחץ בנקודת החדירה למספר שניות לעצירת הדם.
 - מלא 2 סמ"ק דם במבחנה, אך לא יותר מחצי מבחנה. השכב את המבחנה באלכסון ל-5 דקות לקרישת הדם.
 - ניתן להוציא דם גם ע"י מחט ומזרק : מקם את המזרק והמחט בזווית כאשר קצה המחט עם הפתח כלפי מעלה. הכנס את המחט לתוך הוריד ושאב דם בעדינות.
 - רוקן את הדם למבחנה כשהיא באלכסון. השאר לקרישה כאמור.
 - הוצא את המחט ולחץ בנקודת החדירה למספר שניות, לעצירת הדם.
- מזרקים ומחטים במידת הצורך יש לבקש במיוחד במעבדה.
4. יש להעביר את הדם למעבדה תוך 24 שעות. זהירות לא להפוך את גביע המבחנות.
5. את הדגימות, עד הגעתן למעבדה יש לשמור בקירור ב -4°C . אין להקפיא !
- אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה שהיא.

בהצלחה!