

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה - המועצה לענף הלול המעבדות לבריאות העוף

הנחיות לדיגום מטושים לבדיקה וירולוגית

1. המדגם :
 - דיגום מטושים מעופות לבדיקה וירולוגית יתבצע מלפחות – 10 עופות מכל מבנה.
 - הדיגום יתבצע מעופות חיים (עדיפות ראשונה), מתים טריים או שהוקרבו לצורך זה .
 2. יש לרשום את פרטי המשק על גבי השקית כגון : שם המשק, ישוב, מסי' לול.
 3. דיגום :
 - הנח את העוף על משטח, הוצא מטוש סטרילי מהמבחנה, החדר אותו אל תוך קנה הנשימה לעומק של 1-2 ס"מ לפחות וסובב 2 עד 3 פעמים, החזר את המטוש למבחנה.
 - בעופות קטנים יותר, כאשר לא ניתן להחדיר את המטוש בקלות לתוך קנה הנשימה, יש לחתוך את הקנה לאורכו ולאחר מכן לדגום עם מטוש סטרילי או לחלופין להשתמש במטושים דקים.
 - רשום על המבחנה המכילה את המטוש : **קנה**.
 - לכל עוף הכנס מטוש סטרילי אל תוך הביב וסובב 2 עד 3 פעמים, הוצא והכנס למבחנה.
 - רשום על המבחנה המכילה את המטוש : **ביב**.
 4. לבדיקת PCR יש לדגום 10 מטושי קנה ו – 10 מטושי ביב בנוסף לאלה שנדגמו לוירולוגיה.
 5. יש להעביר את המטושים למעבדה בהקדם האפשרי בצירוף טופס מסירת דוגמאות למעבדה בו מצוין החשד למחלה. את הדגימות, עד הגעתן, יש לשמור **בהקפאה**.
- אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה שהיא.

בהצלחה!